

Troubleshooting

Toevoerdruk (-)

Verlaagd

1. Geknikte lijn?
2. Dichtzittende klem?
3. Patiënt van houding laten veranderen
4. Toevoerdruk verminderen (zie afbeelding 1)
5. Bloedpomp stoppen → hub 180° draaien → pomp weer starten (zie afbeelding 2)
6. Optrekken en flushen rode aanvoerpool
7. Dialysemachine laten recirculeren
8. Controleren katheter
 - Terugtrekken en opnieuw vast laten hechten
 - Katheter ompolen (ben bedacht op recirculatie)
9. Denk aan ondervulling, overweeg fluidchallenge in overleg met de arts



Teruggave druk (+)

Verhoogd

1. Afgeknikte lijn?
2. Dichtzittende klem?
3. Patiënt van houding laten veranderen
4. Bloedpomp stoppen → hub 180° draaien → pomp weer starten (zie afbeelding 2)
5. Optrekken en flushen blauwe teruggavepool
6. Dialysemachine laten recirculeren
7. Controleren katheter
 - Terugtrekken en opnieuw vast laten hechten
 - Katheter ompolen (ben bedacht op recirculatie)
8. Probleem niet opgelost? Overweeg een nieuwe dialysekatheter

Verlaagd

1. Controleer de houding
2. Indien teruggave druk 0-5 mmHg blijft bij mobiliseren: bloedflow en dialysaatflow tijdelijk verhogen in verhouding 1:20.

Prefilter druk

Verhoogd

- | | |
|---|--|
| 1. Is de teruggave druk verhoogd? | → Volg het schema teruggave druk verhoogd |
| 2. Loopt de Prefilterdruk langzaam op? | → Stolling van het filter |
| 3. Prefilterdruk >300 mmHg | → Bloed teruggeven en machine opnieuw opbouwen |
| 4. Zo nodig antistollingsbeleid optimaliseren | |

Overig

Alarmen

Fout dynamische druktest teruggave druk

1. Nat hydrofobe filter vervangen (zie afbeelding 3)
(Lijntjes liggen in de kast bij de dialyselijnen)
2. Verhoog eventueel het niveau in de luchtvrager

Weegschaal problemen

1. Check of klemmen van dialysaat en ultrafiltraat open staan
2. Open zakwisselprogramma om een her balans uit te voeren en herstart behandeling
3. Ultrafiltraat zak legen in het zakwisselprogramma

Recirculeren

1. Zorg dat er altijd Y spike en zak 500cc NaCl 0.9% klaarhangt
2. Onderbreking behandeling modus (zie afbeelding 4)
3. Met bloederuggave en volg stappen die machine aangeeft
4. Maximaal 240 minuten recirculeren

